

【質問】エクリラの残りの吸入回数がわかりますか？

【回答】

- ジェヌエア(吸入器)のカウンターに、残りの吸入回数が表示されています。
- 30吸入用のカウンターの数字は、最初は「30」で、ボタンをしっかりと下まで押しごとに「30」が少しずつ左にずれていき「20」、「10」、「0」の順にかわっていきます。
- 60吸入用のカウンターの数字は、最初は「60」で、ボタンをしっかりと下まで押しごとに「60」が少しずつ左にずれていき「50」、「40」、「30」、「20」、「10」、「0」の順にかわっていきます。
- 「赤色の線」が見え始めたら、再受診して新しいお薬を準備するよう指導してください。

薬剤の残量を表示する
カウンター(10回刻み)

30吸入用 30 20 10 0

60吸入用 60 50 40 30 20 10 0

ボタンを下までしっかりと押しごとに
少しずつ左に動きます。



「赤色の線」が見え始めたら、
再受診して新しいお薬を準備
してください。

なお、カウンターの中央に「0」が表示されると、「ボタン」が押されたままロックされ、戻らなくなります。この状態で、最後の1回分の吸入ができます。

出典：患者用説明文書