

**【質問】** ナノトラップの感度、特異性は？(ウイルス分離培養法との比較)

**【回答】**

ナノトラップの感度としてウイルス分離培養法との陽性一致率を、また特異性としてウイルス分離培養法との陰性一致率を鼻汁鼻かみ液にて計測した結果を下記に示します。

### 鼻汁鼻かみ液

		陽性一致率	陰性一致率	全体一致率	検体数
鼻汁 鼻かみ液	A型	83.3 (65/78)	94.7 (72/76)	89.0 (137/154)	154
	B型	90.0 (18/20)	92.5 (124/134)	92.2 (142/154)	154

出典：添付文書