

KYORIN

製造販売元 積水メディカル株式会社
発売元 杏林製薬株式会社

Drug Information

「ラピッドテスト®FLUスティック」 キット付属の検体採取用綿棒の取り扱いについて

謹啓 時下ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご愛顧いただいておりますインフルエンザウイルスキット「ラピッドテスト®FLUスティック」（製造販売元：積水メディカル株式会社 発売元：杏林製薬株式会社）において、製品付属の綿棒にて検体採取の際、使用方法によってまれに綿棒が折れることが報告されております。

つきましては、付属の検体採取用綿棒にて検体を採取する際は、下記の点に十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。

- 綿棒に破損・折れ・曲がりなどがあった場合は使用しないでください。
- 検体を採取する前に綿棒の軸部分を折り曲げたり、湾曲させて使用しないでください。
- 検体を採取する時は、力を入れすぎたり、強く押ししたりして、綿棒の軸を折らないように注意してください。軸が折れた場合、採取部位の粘膜を傷つけたり、折れた綿棒が鼻腔内に残留するおそれがあります。
- 小児等では、検体採取中に手や頭を動かすことがあるので、特に注意してください。

安全に検査を行っていただくため、宜しくご高配の程お願い申し上げます。

謹白